

ADVARSEL:

- "Det er vigtigt at følge denne vejledning om korrekt brug af mundbind."
- "Hvis man har symptomer på luftvejsinfektion, er dette mundbind uegnet. Søg råd hos egen læge."
- "Kontrollér altid, at mundbindet er sat korrekt på og er tætsluttende og dækker næse og mund."
- "Mundbindet er ikke egnet til børn på 5 år og under. Det anbefales, at børn fra 6 til 12 år holdes under opsyn, når de bærer mundbind."
- "Bør ikke anvendes ved hård fysisk aktivitet."
- "Mundbindet bør vaskes, før det benyttes første gang. Brug ikke kemisk rensning eller skyllemiddel."
- "Vask mundbindet efter hver brug ved 60 °C."
- "Skift mundbindet ofte og mindst dagligt, og altid når det er fugtigt eller ikke er synligt rent."
- "Skæg kan reducere mundbindets effekt."
- "Håndteres med rene hænder."
- "Mundbindets forside og bagside bør ikke berøres – tag fat i stropperne."
- "Hold rene og brugte mundbind adskilt i hver sin pose."
- "Vask hænder eller sprit af før og efter på- og aftagning af mundbindet."
- "Filtreringsevne 70%-90%"
- "Mundbindets formål er at mindske spredningen af partikler fra brugeren. Mundbindet er ikke medicinskudstyr eller personligt værnemiddel. Hvis brugeren har brug for beskyttelse, anbefales et personligt værnemiddel."



YOU BRANDS

www.you.dk